



OBZOR
na dosah...

typ 02 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 136x81x25 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- dostupná v několika barevných provedeních
- každý den je rozdělen na 3 části RÁNO / POLEDNE / VEČER
- každá část týdne se otevírá samostatně pomocí vysunutí šoupátko

návod k použití

Dávkovač uchopte do vodorovné polohy (popisky jednotlivých dnů jsou nahoru) a tahem ruky vysuňte šoupátko. Při prvním otevření je nutné použít větší sílu, při opakovaném otevírání již půjde šoupátko vysunovat snadněji. Kazetu naplňte léky dle předpisu či doporučení a poté šoupátko zasuňte zpět až do jeho zaklapnutí.



typ 03 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 200x100x25 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- každý den je rozdělen na 3 barevně odlišené části RÁNO / POLEDNE / VEČER a lze ho z kazety vyjmout a používat samostatně jako denní dávkovač
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

návod k použití

Dávkovač uchopte do vodorovné polohy (popisky dnů jsou vlevo). Na denní zásobník zatlačte palcem ze strany od popisků směrem doprava a vysuňte jej z kazety. Víčko zásobníku otevřete tažením za výstupek směrem nahoru (výrobek je z vysokého odolného plastu z důvodu delší životnosti, proto může být první otevírání víčka obtížnější). Zásobník naplňte léky, víčka zaklapněte. Zásobník vysuňte do drážky na kazetě a zasuňte zpět do kazety.



typ 04 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 175x125x20 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- dostupná v několika barevných provedeních
- každý jednotlivý den je rozdělen na 4 části RÁNO / POLEDNE / VEČER / NOC a lze ho vyjmout a používat samostatně jako denní dávkovač
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

návod k použití

Dávkovač uchopte tak, aby popisky jednotlivých dnů byly na levé straně. Na spodní straně kazety je u každého dne otvor. Tímto otvorem zatlačte prstem na denní zásobník a vyjměte ho z kazety. Víčko zásobníku otevřete tažením za výstupek směrem nahoru. Zásobník naplňte léky, víčka zaklapněte a poté ho zatlačte zpět do kazety, až do jeho zaklapnutí. Postup opakujte pro každý další den.




typ 09 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 175x125x20 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- dostupná v několika barevných provedeních
- každý jednotlivý den je rozdělen na 3 části RÁNO / POLEDNE / VEČER a lze ho vyjmout a používat samostatně jako denní dávkovač
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

návod k použití

Dávkovač uchopte tak, aby popisky jednotlivých dnů byly na levé straně. Na spodní straně kazety je u každého dne otvor. Tímto otvorem zatlačte prstem na denní zásobník a vyjměte ho z kazety. Víčko zásobníku otevřete tažením za výstupek směrem nahoru. Zásobník naplňte léky, víčka zaklapněte a poté ho zatlačte zpět do kazety, až do jeho zaklapnutí. Postup opakujte pro každý další den.

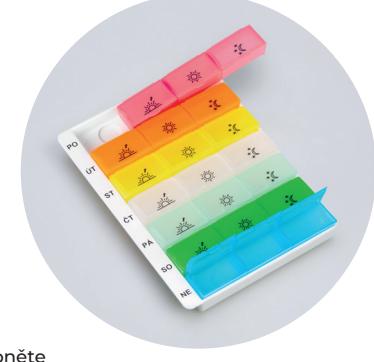

Vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu. Schváleno Státním zdravotním ústavem v Praze. V případě likvidace postupujte prosím v souladu se zákonem o odpadech.

Záruka se nevtahuje na běžné opotřebení, ani na škody způsobené nesprávným použitím výrobku.



typ 07 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 140x30x20 mm (d\x\times v)
- dávkovač na léky pro celý týden
- dostupný v několika barevných provedeních
- týden je rozdělen pomocí zkratky dnů na 7 částí
- každý den se otevírá samostatně pomocí víčka, zatímco ostatní dny zůstávají pečlivě uzavřeny
- možnost jednobarevného potisku (např. firemním logem)
- vhodné pro reklamní účely jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální zařízení, firmy nebo reklamní agentury
- praktické víceúčelové použití



návod k použití

Dávkovač uchopte do rukou a táhněte za výstupek na víčku směrem nahoru. První otevírání víčka může být obtížnější. Dávkovač naplňte léky a víčko zaklapněte.

typ 03 denní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 95x24x25 mm (d\x\times v)
- dávkovač na léky na 1 den, který je rozdělen na 3 barevně odlišené části RÁNO / POLEDNE / VEČER
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka, zatímco ostatní části zůstávají pečlivě uzavřeny



návod k použití

Dávkovač uchopte do rukou a táhněte za výstupek na víčku směrem nahoru. Výrobek je z vysoko odolného plastu z důvodu delší životnosti, proto může být první otevírání víčka obtížnější. Dávkovač naplňte léky a víčko zaklapněte.

typ 04 denní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 110x22x20 mm (d\x\times v)
- dávkovač na léky na 1 den dostupný v několika barevných provedeních
- den je rozdělen pomocí symbolů na 4 části RÁNO / POLEDNE / VEČER / NOC
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka, zatímco ostatní části zůstávají pečlivě uzavřeny
- vhodné pro reklamní účely s možností jednobarevného potisku (např. firemním logem)
- praktické víceúčelové použití



návod k použití

Dávkovač uchopte do rukou a táhněte za výstupek na víčku směrem nahoru. Dávkovač naplňte léky a víčko zaklapněte.

typ 05 kapesní dávkovač léků

- velikost dávkovače: ø 50 mm, výška 15 mm
- cestovní forma dávkovače na léky vhodná jako přívěsek na klíče
- dostupný v několika barevných kombinacích
- dávkovač je rozdělen na 2 části
- možnost jednobarevného potisku (např. firemním logem)
- vhodné pro reklamní účely jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální zařízení, firmy nebo reklamní agentury
- praktické víceúčelové použití



návod k použití

Dávkovač uchopte prsty obou rukou a pootočte proti sobě víčko a dno. Vložte léky a dávkovač otočením zavřete.

víceúčelová dentální dóza

- velikost dózy: ø 98 mm, výška 72 mm
- víceúčelová dentální dóza určená k odkládání a čištění zubních protéz a dětských rovnátek
- dostupná v několika barevných kombinacích
- skládá se ze 3 částí – misky, ponorného sítku a víčka
- využitelná v široké škále dalších oborů jako je zdravotnictví, laboratoře, kosmetika, kuchyně atd.



návod k použití

Zubní protézu (dětská rovnátka) očistíme kartáčkem, opláchneme a vložíme do dózy. Při použití čisticích tablet vložíme výrobcem doporučený počet tablet na dno dózy.

Zubní protézu (rovnátka), umístěnu v ponorném sítku, vsuneme do dózy a zalijeme teplou vodou, až je úplně ponořena. Přiklopíme víčkem a necháme působit. Před použitím protézu (rovnátka) propláchneme pod tekoucí vodou.

výrobky pro reklamní účely

- kvalitní české výrobky pro všechny věkové kategorie
- originální moderní design a různá barevná provedení
- vhodné jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální zařízení, firmy, reklamní agentury, fitness či organizátory výstav, veletrhů a seminářů
- možnost jednobarevného potisku (např. logem Vaši společnosti)
- bez potisku i v malých množstvích
- krátká dodací lhůta
- praktické víceúčelové použití

